

codent



AEOLUS6

LAVEUR THERMO-DÉSINFECTEUR,
LUBRIFICATEUR POUR PIÈCES À MAIN,
CONTRE-ANGLES ET TURBINES



AEOLUS 6

UN MOYEN FACILE D'ATTEINDRE LA PERFECTION

OBTENEZ LE MAXIMUM AVEC AEOLUS 6

Au quotidien l'hygiène de vos instruments prend de plus en plus d'importance et fait l'objet d'une surveillance croissante. Assurez la protection de votre équipe et de vos patients sans perdre de temps.

Avec AEOLUS 6, le laveur combiné, le thermo-désinfecteur et le lubrificateur permet de lubrifier jusqu'à six pièces à main droites et contre-angles ainsi que des turbines en 18 minutes par simple pression d'un bouton avec une sécurité hygiénique maximale.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Le processus de nettoyage et de désinfection s'effectue conformément à la norme internationale en matière de lavage et de désinfection. Le laveur thermo-désinfecteur AEOLUS 6 répond aux exigences de la norme européenne EN 15883.

A top-down view of the stainless steel instrument tray, showing several dental instruments (handpieces, burs, etc.) arranged around a central hub. The tray has a circular design with radial lines.

3x
TRIPLE ROTATION PENDANT LE CYCLE

6x1
6 INSTRUMENTS PAR CYCLE

25°C
40°C
80°C
PROCÉDÉ THERMIQUE INTERNE ET EXTERNE POUR LE PRÉLAVAGE, LAVAGE ET DÉSINFECTION

LUBRIFICATION AVEC PROCÉDÉ DE ROTATION INTERNE DYNAMIQUE

SÉCHAGE RAPIDE INTERNE ET EXTERNE DES INSTRUMENTS

CYCLE RAPIDE

CONNECTÉ À L'EAU DE VILLE

GRAND ÉCRAN TACTILE COULEUR, CONVIVIAL ET FACILE À UTILISER

FERMETURE DE PORTE ÉLECTRIQUE

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DES RAPPORTS DE CYCLE SUR USB

CONNECTIVITÉ INTERNET VPN POUR SERVICE À DISTANCE

HAUTE PERFORMANCE RAPIDE ET FACILE À UTILISER POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

HYGIÈNE PARFAITE DE VOS INSTRUMENTS ROTATIFS

Une simple pression sur l'écran tactile de l'AEOLUS 6 déclenche la fermeture automatique de la porte et lance le cycle de nettoyage, de désinfection à haute température de vos instruments internes et externes en rotation continue ainsi que la lubrification et la maintenance de vos instruments. L'ensemble du programme est entièrement automatique et fiable.

Toutes les étapes d'hygiène lors du retraitement des instruments, comme le prélavage, le lavage, la désinfection, la lubrification, sont effectuées dans un cycle d'hygiène fermé en 18 minutes. Une fois le cycle terminé, les instruments entièrement séchés seront disponibles avec un résultat d'hygiène parfait conforme à la norme EN 15883 en vigueur.



LE PROCESSUS COMPLET DE AEOLUS 6



01

Prélavage avec triple rotation permanente à basse température 20°C pour éviter la coagulation des protéines



02

Lavage à 45°C avec solution chimique et triple rotation permanente



03

Désinfection thermique à 90° avec triple rotation permanente




04

Séchage de l'instrumentation extérieurement et intérieurement



05

Lubrification interne des instruments rotatifs avec rotation interne permanente

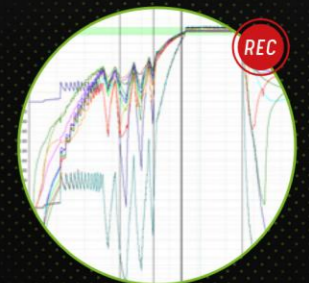

06

Enregistrement du cycle

LA GAMME DE PRODUITS D'HYGIENE CODENT

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE AVEC LE PLUS HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

LA GAMME COMPLÈTE DE CODENT

Une hygiène parfaite, simple et rapide qui comprend le prélavage, le lavage, la désinfection, la lubrification et la stérilisation pour une plus grande sécurité pour vous et vos patients.

Codent vous offre une solution d'hygiène complète pour garantir la longévité et la performance de vos pièces à main, contre-angles, turbines et instruments manuels, ce qui se traduit par une meilleure longévité.



*CYCLE DE STÉRILISATION RAPIDE 12 MIN - 2 KG
CYCLE DE STÉRILISATION STANDARD B 22 MIN - 5,5 KG AVEC SACHETS SCELLÉS
CYCLE DE STÉRILISATION B-PRION 38 MIN - 5,5 KG AVEC SACHETS SCELLÉS

AU-DELÀ DE LA PERFORMANCE, AEOLUS 6 SE DISTINGUE ÉGALEMENT PAR UN DESIGN PUR ET INTELLIGENT.

Aeolus 6 permet de traiter 6 instruments en même temps, équipé d'une porte de fermeture électrique simple d'utilisation qui permet d'offrir des surfaces totalement lisses, exemptes de nervures qui pourraient générer un nid bactérien. Il devient facile à nettoyer pour plus d'hygiène et de durabilité.



AEOLUS 6 ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



AEOLUS 6 BLANC

PRODUITS & ACCESSOIRES

AEOLUS 6 blanc	Ref. 100 000
AEOLUS 6 acier inox brossé	Ref. 100 100
Ao clean Solution 6 bouteilles de 1 litre	Ref. 100 500
Huile d'entretien Huile, 6 bouteilles de 1 litre	Ref. 100 510
Ao clean Solution 1 bouteille de 1 litre	Ref. 100 501
Huile d'entretien Huile, 1 bouteille de 1 litre	Ref. 100 511
ystème de purification d'eau CO+	Ref. 100 520
Adaptateur Etype	Ref. 100 001
Adaptateur PTL	Ref. 100 002
Adaptateur KV	Ref. 100 003
Adaptateur SR	Ref. 100 004
Adaptateur WH	Ref. 100 005
Adaptateur BA	Ref. 100 006

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures (H x L x P)	344 x 320 x 500 mm
Capacité	jusqu'à 6 instruments
Poids net	30 kg
Tension CE	100 - 230 V / 50 - 60 Hz
Pression d'alimentation	3,5 bars
Capacité du réservoir d'huile	300ml
Capacité du réservoir de désinfection	300ml
Conformité à la norme européenne	EN-15883

Offre de lancement

Aeolus 6

5590€ TTC

Distributeur exclusif Normandie, départements 14,50,61,27,76

Idem dentaire sarl
3 rue aux juifs
14000 Caen

Tél : 09.50.18.47.00
Mail : contacts@idem-dentaire.fr
Web : <http://www.idem-dentaire.fr>

CODENT-EUROPE GMBH
Untere Buchstr. 5
76751 Jockgrim
GERMANY
Tél.: +49 7271 9889930

Contacts
info@codent-europe.com
www.codent-europe.com