

codent



AQUILO20

AUTOCLAVE



LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'AUTOCLAVE

AQUILO 20 À LA RENCONTRE DE LA PERFECTION

L'AQUILO 20, grâce à sa construction, offre enfin la possibilité d'accéder aux cycles de stérilisation de classe B en un temps record et avec un résultat de stérilisation très élevé.


Le nouveau système innovant « vacuum + venturi », extrêmement puissant, permet de pressuriser le réservoir en très peu de temps alors que d'autres appareils prennent beaucoup plus de temps pour effectuer la même opération. Sans une évacuation maximale de l'air, la vapeur ne peut pas se propager complètement ou complètement. L'ajout de la pressurisation rapide et totale permet d'obtenir un temps d'action rapide qui facilite pleinement la pénétration homogène de la vapeur avec le meilleur résultat de stérilisation.

NOUVEAU «VACUUM + VENTURI»

Le nouveau système innovant «vacuum + venturi» offre une fiabilité incomparable et pour un nombre de cycles supérieur à tous les modèles existants.

CONFORMITÉ AUX NORMES

L'autoclave de l'AQUILO 20 répond aux exigences de la norme européenne EN-13060.

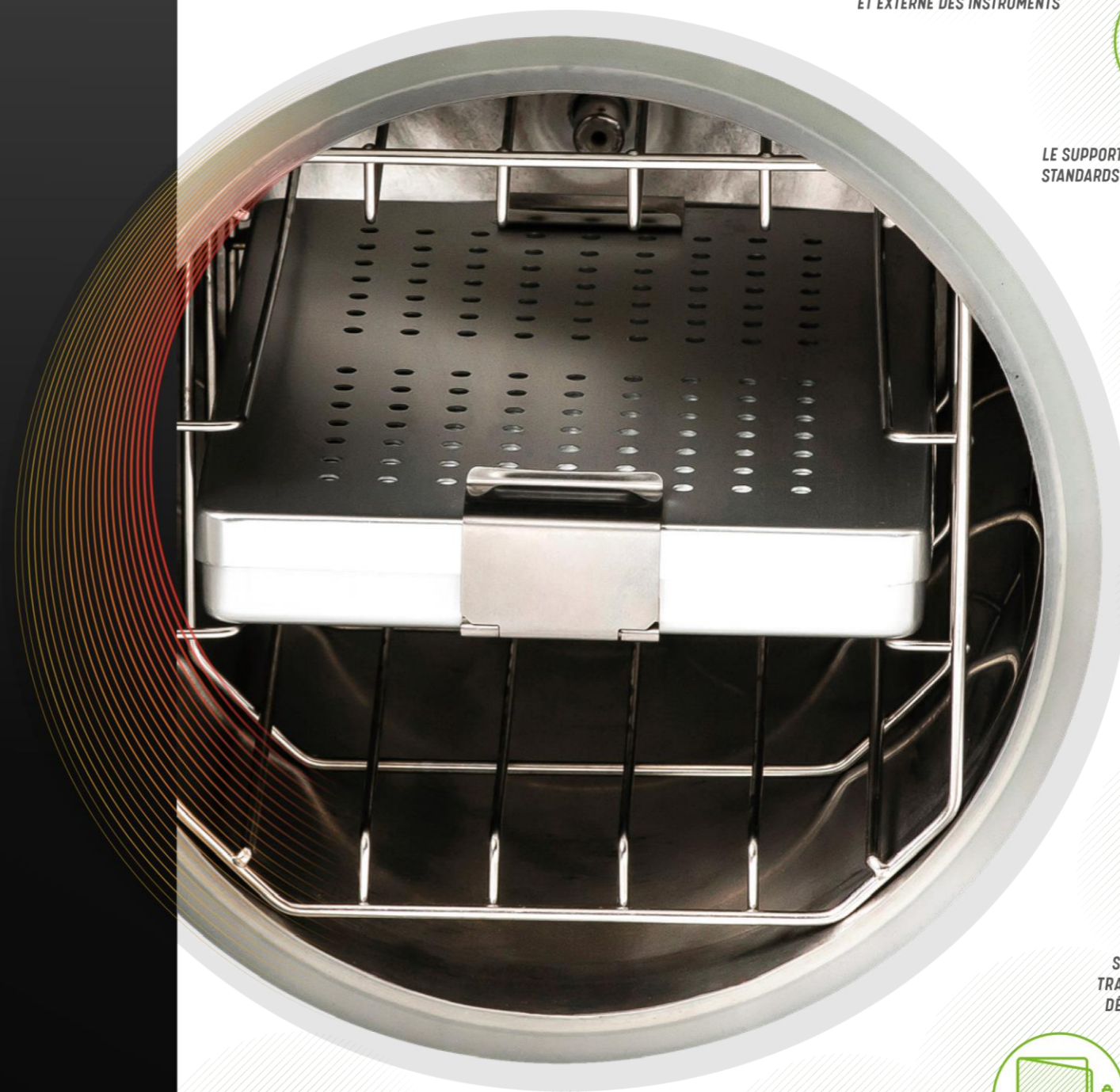

CHAMBRE INNOVANTE DE 20 LITRES À DOUBLE PARI POUR UNE TRANSMISSION RAPIDE ET UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE MAXIMALE.



NOUVEAU SYSTÈME DE POMPE INNOVANTE «INNOVATIVE VACUUM + BY VENTURI» PLUS RAPIDE ET PLUS PUISSANT



SÉCHAGE RAPIDE INTERNE ET EXTERNE DES INSTRUMENTS



LE SUPPORT ROTATIF PERMET 5 PLATEAUX STANDARDS OU 3 CASSETTES STANDARDS.



CYCLE RAPIDE



CONNEXION À L'EAU DE VILLE



SYSTÈME INTÉGRÉ INTERNE POUR TRAITEMENT DE L'EAU POUR UNE EAU DÉMINÉRALISÉE DE HAUTE QUALITÉ



PORTE ÉLECTRIQUE



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



CONNECTIVITÉ INTERNET VPN POUR ASSISTANCE À DISTANCE



ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE RAPPORTS DE CYCLES SUR PORT USB

AQUILO 20 OFFRE UNE NOUVELLE VISION DE LA STÉRILISATION

Aquilo 20, offre une seule chambre, qui a été incorporée dans une autre chambre, les deux chambres en acier inoxydable créant une double paroi. La double paroi étanche est remplie aux 3/4 d'eau déminéralisée, le système de chauffage spécial génère une température élevée pour chauffer une grande quantité d'eau en peu de temps, ce qui produit continuellement un très grand volume de vapeur de haute qualité prête à être injectée dans le réservoir de 20 litres.

La paroi intérieure de la première chambre étant en permanence très chaude par contact avec de l'eau à haute température, elle transmet ainsi une chaleur homogène élevée sur toute la surface du réservoir intérieur et permet à la vapeur injectée dans le réservoir de circuler physiquement sur toutes les surfaces des instruments à température ambiante ou froide ainsi que sur toutes les surfaces intérieures et extérieures des instruments rotatifs. Cette action offre le meilleur résultat de stérilisation.

La chambre double offre une efficacité d'action incomparable grâce à sa simple innovation technique où d'autres produits nécessitent de nombreux composants techniques qui risquent de tomber en panne et d'être fiables ou de se détériorer.

Les autoclaves sont toujours livrés avec un support pour plateaux ou cassettes. Le support rotatif permet d'y placer 5 plateaux standard ou 3 cassettes standard.




LA GAMME DE PRODUITS D'HYGIENE CODENT

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE AVEC LE PLUS HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

LA GAMME COMPLETE DE CODENT

Une hygiène parfaite, simple et rapide qui comprend le pré-lavage, le lavage, la désinfection, la lubrification et la stérilisation pour une plus grande sécurité pour vous et vos patients.

Codent vous offre une solution d'hygiène complète pour garantir la longévité et la performance de vos pièces à main, contre-angles, turbines et instruments manuels, ce qui se traduit par une meilleure longévité.

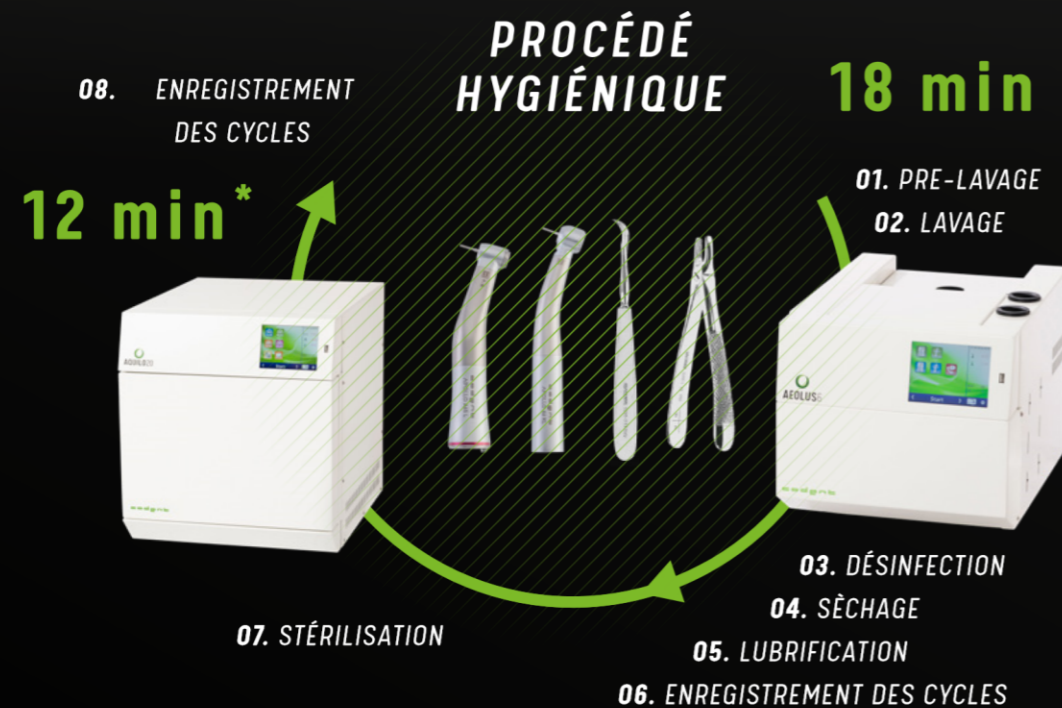

*CYCLE DE STÉRILISATION RAPIDE 12 MIN - 2 KG
CYCLE DE STÉRILISATION STANDARD B 22 MIN - 5,5 KG AVEC SACHETS SCÉLLÉS
CYCLE DE STÉRILISATION B-PRION 38 MIN - 5,5 KG AVEC SACHETS SCÉLLÉS

AU-DELÀ DE LA PERFORMANCE, AQUILO 20 EST ÉGALEMENT ENRICHIS PAR UN DESIGN PUR ET INTELLIGENT

Aquilo 20, malgré une double chambre, sa dimension extérieure reste très compacte et offre une grande capacité de 20 litres pour un temps de cycle extrêmement rapide.

Dotée d'une porte électrique, facile à utiliser, elle permet d'offrir des surfaces totalement lisses, exemptes de nervures qui pourraient générer un nid bactérien. Il devient facile à nettoyer pour plus d'hygiène et de durabilité.



AQUILO 20 ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



AQUILO 20 BLANC

PRODUITS & ACCESSOIRES

Aquillo 20 blanc	Ref. 200 000
Aquillo 20 inox	Ref. 200 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures (H x L x P)	435 x 490 x 550 mm
Capacité de la chambre	20 litres
Poids net	50 kg
Tension CE	100 - 230 V / 50 - 60 Hz
Conformité à la norme européenne	EN-13060

Offre de lancement

Aquilo 20

5790€ TTC

Distributeur exclusif Normandie, départements 14,50,61,27,76

Idem dentaire sarl
3 rue aux juifs
14000 Caen

Tél : 09.50.18.47.00
Mail : contacts@idem-dentaire.fr
Web : <http://www.idem-dentaire.fr>

CODENT-EUROPE GMBH
Untere Buchstr. 5
76751 Jockgrim
GERMANY
Tél.: +49 7271 9889930

Contacts
info@codent-europe.com
www.codent-europe.com